

# Dentflex



## INSTRUÇÕES DE USO

**ED FILE® ADAPTOR**

Cabo para Lima Mecânica

## CABO PARA LIMA MECÂNICA

O dispositivo é um equipamento inovador idealizado para fixar limas endodônticas de níquel-titânio (NiTi) para serem acionadas manualmente, sem a necessidade de um motor.

## INDICAÇÕES E FINALIDADES

O dispositivo é indicado para tratamento de dentes que, por algum motivo (cárie, trauma, indicação reabilitadora), necessitam ser submetidos à terapia endodôntica. (tratamento de canal radicular). O dispositivo permite ao cirurgião-dentista a possibilidade de utilizar manualmente limas endodônticas em NiTi que antes eram possíveis ser utilizadas unicamente por acionamento mecanizado (por meio de contra ângulo mecanizado).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PESO	5 gramas
SISTEMA DE FIXAÇÃO DA LIMA	PUSH BOTTON (PB)

## INSERÇÃO E RETIRADA DA LIMA

1 - Pressione a parte central do botão acionador para abertura da pinça. Insira ou retire a lima. (Fig. 2 / Fig. 3).

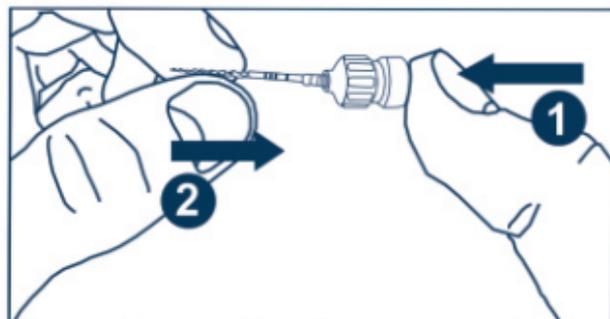


Fig. 2 - Inserção da Lima.

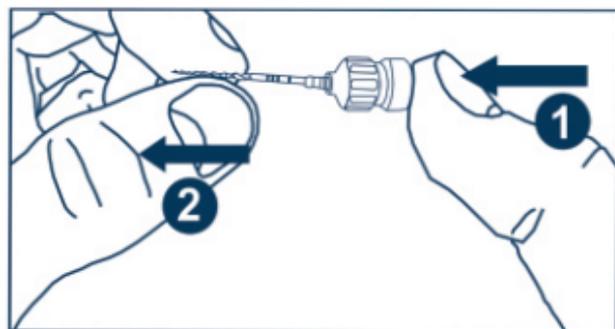


Fig. 3 - Retirada da Lima.



1- Utilizar somente limas que possuam haste de acordo com a Norma ISO 1797-1 do tipo 1, com as seguintes especificações:  $\varnothing$  2,334 mm a 2,35 mm.

## INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

O equipamento pode ser desinfetado com escova e detergente líquido ou similar, aplicado sobre sua superfície através de um pano ou spray.



Não lavar o instrumento em limpadores ultra-sônicos.



O instrumento deve ser esterilizado antes e após cada tratamento e somente em autoclave a uma temperatura de no máximo 135° C e 2,2 Bar.



Antes da primeira colocação em serviço é necessário esterilizar o instrumento.

## MANUTENÇÃO CORRETIVA

Todas as recomendações de utilização se encontram neste Manual, mas se apresentar algum problema ou mau funcionamento for detectado entre em contato com o Centro de Suporte Técnico Dentflex para realizar a correção do problema. Não tente abrir o produto e/ou consertá-lo sozinho ou com auxílio de pessoas não treinadas/autorizadas para tanto, isto pode agravar o problema ou até mesmo gerar falhas que possam comprometer a segurança do produto.

# GARANTIA

Para informações sobre o prazo de garantia, vide o certificado do produto. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação a partir da data de emissão da respectiva Nota Fiscal de Venda.

Motivos de perda da garantia:

- Instalação e/ou operação em desacordo com esta instrução de manutenção.
- Queda.
- Danos ao acabamento externo e/ou acessórios aos quais o fabricante não houver dado causa.

## CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO DENTFLEX

Com o propósito de oferecer um serviço que garanta 100% de satisfação, APRESENTAMOS ao cliente o Centro de Suporte Técnico Dentflex, uma inovação no atendimento que veio para proporcionar agilidade, segurança e transparência no processo de manutenção de seu produto Dentflex. Contamos com uma infraestrutura e equipe de profissionais qualificados, garantindo a mais completa assistência técnica para toda linha de produtos Dentflex.

- Técnicos e engenheiros capacitados;
- Maquinários e equipamentos de última geração;
- Componentes originais.

Para utilizar o serviço oferecido pelo Centro de Suporte Técnico Dentflex entre em nosso site: Serviços/Assistência da Fábrica - [www.dentflex.com.br/assistencia-tecnica-diretamente-da-fabrica](http://www.dentflex.com.br/assistencia-tecnica-diretamente-da-fabrica) e siga o passo a passo informado.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

E-mail: [sac@dentflex.com.br](mailto:sac@dentflex.com.br) / Telefones (16) 99404-4435 e (16) 2133-0000.

REGISTRO ANVISA / MS: 10427100025  
Responsável Técnico: Eng<sup>o</sup> Alan Trevizani Chiappa  
CREA / SP nº: 5061315280

# Dentflex



**Dentflex Indústria e Comércio Ltda.**

Av. Thomaz Alberto Wately, 670 - Parque Industrial Tanquinho  
CNPJ: 66.818.360/0001-03 - Inscrição Estadual: 582.312.326.113  
Cep/Zip Code/Código Postal: 14075-380  
Ribeirão Preto/São Paulo - Brasil

Fone/Phone/Teléfono: +55 16 2133.0000  
Fax/Fax/Fax: + 55 16 2133.0008  
[dentflex@dentflex.com.br](mailto:dentflex@dentflex.com.br)

**Fabricado no Brasil - Made in Brazil - Hecho en Brasil**  
[www.dentflex.com.br](http://www.dentflex.com.br)  
[dentflex.com.br](http://dentflex.com.br)